


Guide för batteribyte



Gör så här


- 1 Avlägsna batterikassetten genom att pressa samman klämmorna på batteripaketets båda sidor. Drag kassetten rakt bakåt.
- 2 Tag av plasten från den nya kassetten. Lägg kassetten framför hjärtstartaren med den flata sidan nedåt och för in den i hjärtstartaren tills ni hört ett klick då kassetten låser fast i hjärtstartaren. **Kontrollera att kassetten sitter ordentligt igenom att trycka till kassetten igen.** Vid installation av kassetten kan hjärtstartaren avge ett litet pip och symbolerna på hjärtstartarens ovansida blinka till.
- 3 Efter en liten stund börjar hjärtstartaren blinka grönt och är nu färdig för användning. **Kontrollera nu att den gröna statusindikatiorn** på hjärtstartarens display blinkar med ett grönt sken var 5:e sekund.
- 4 **Starta hjärtstartaren** genom att trycka på den gröna on/off knappen. Hjärtstartaren börjar nu tala, men stäng av den igen efter du hör rösten. Hjärtstartaren är nu redo att användas, lägg tillbaka den i väskans gula fack.
- 5 Dra hårt i **förvaringsväskans** gröna flik. Rätta till den gröna plastflik som ni ser sticka ut från hjärtstartaren så att den pekar utåt. Det är i denna gröna plastflik ni sedan uppmanas dra i när ni ska använda hjärtstartaren i skarpt läge. Då bör denna vara redo att dras i och inte ligga dubbelvikt inne i väskan.

Nu har ni en hjärtstartare redo att användas och den kommer nu blinka var 5:e sekund i över 4 år om alla självtester är ok.

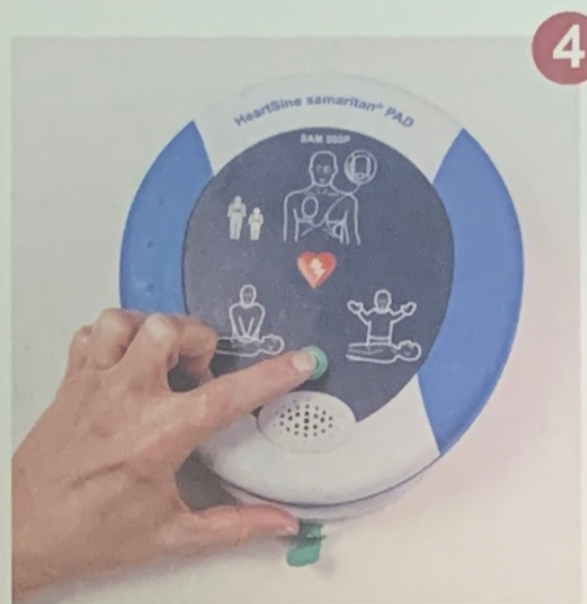

BATTERIBYTE

Hjärtstartaren drivs av ett lituimbatteri som finns i denna kassett. På den platta sidan av kassetten finner du information om sista förbrukningsdag.

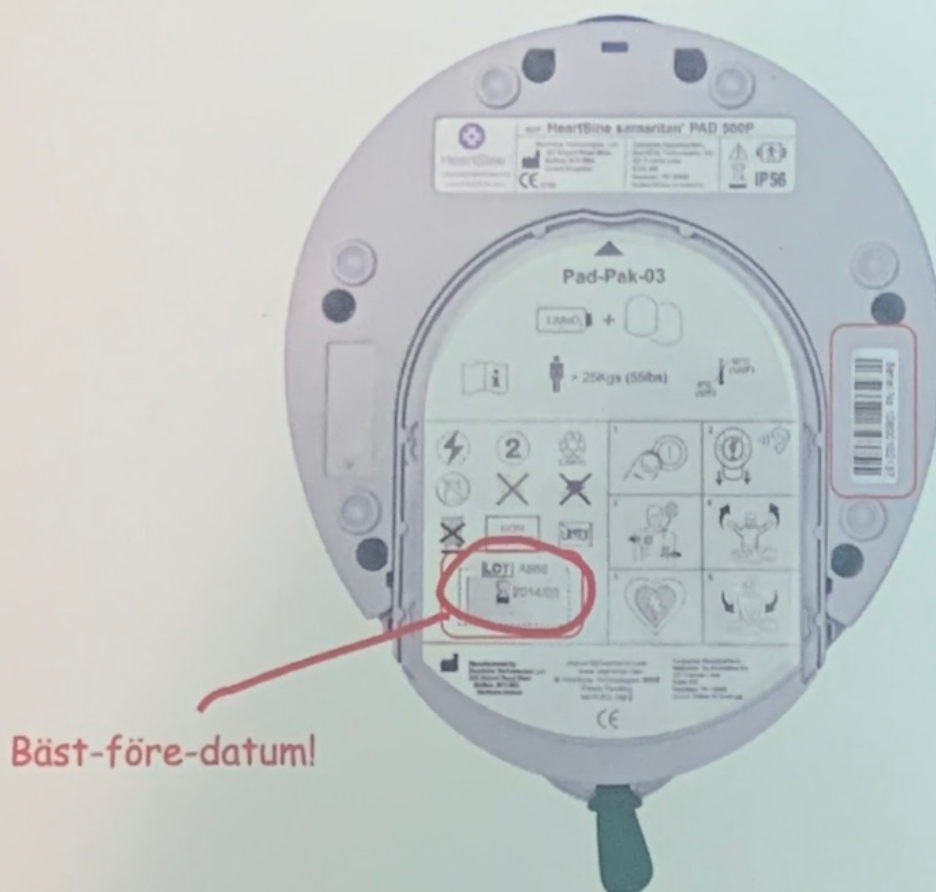

Bäst-före-datum!

